


Персональный алкотестер-брелок «4 в 1».

Краткая характеристика

- Тест на алкоголь в 3 этапа;
- Немедленное получение результата;
- Фонарик (оранжевый светодиод);
- Кольцо для ключей;
- Встроенный секундомер и таймер обратного отсчета;
- Питание – 2 алкалайновые батарейки AAA типа (1.5В). Приобретаются отдельно.

Органы управления

- 1 – Датчик
- 2 – Красный индикатор
- 3 – Желтый индикатор
- 4 – Зеленый индикатор
- 5 – Кнопка СТАРТ/СТОП (START/STOP)
- 6 – Кнопка МИНУТЫ (MIN)
- 7 – Кнопка ЧАСЫ (HR)
- 8 – Фонарик
- 9 – Кнопка включения/выключения
- 10 – ЖК-дисплей
- 11 – Кнопка вкл/выкл. фонарика
- 12 – Отсек для элементов питания
- 13 – Кольцо для крепления

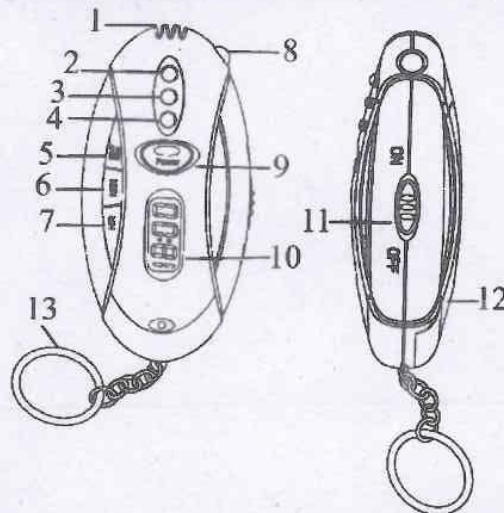

Установка и замена элементов питания

1. Откройте крышку отсека для батареек;
2. Вставьте две высококачественные алкалайновые батарейки 1.5В AAA/UM-4 типа, соблюдая полярность;
3. Закройте крышку отсека;
4. Когда свет индикаторов или лампочки фонарика станут тусклыми, замените батарейки.

Тест на алкоголь

1. Разверните алкотестер датчиком к себе, индикаторами вверх;
2. Нажмите и удерживайте кнопку POWER указательным пальцем правой руки. Индикаторы начнут мерцать попеременно, когда мерцание прекратится, и зеленый индикатор начнет светиться стабильно - прибор готов к тестированию;
3. Не отпуская кнопку POWER, с расстояния 1-2см подуйте в датчик в течение не менее 3-4 секунд;
4. Не отпуская кнопку POWER, смотрите на индикаторы, которые по истечении 10-15 секунд должны засветиться в соответствии с уровнем содержания алкоголя в Вашей крови:

- Светится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор: Безопасно – концентрация алкоголя в крови ниже 0,02% ВАС (или 0,1 мг/л ВРАС)

- Светится ЖЕЛТЫЙ индикатор: Осторожно – от 0,02% ВАС (или 0,1 мг/л ВРАС) до 0,05% ВАС (или 0,25 мг/л ВРАС)

- Светятся КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ индикаторы: Опасно - свыше 0,05% ВАС (или 0,25 мг/л ВРАС).

*ВАС-Blood Alcohol Concentration - Концентрация алкоголя в крови.

Примечания:

1. Пожалуйста, убедитесь, что во время всего тестирования кнопка POWER нажата;
2. Для получения наиболее точного результата, рекомендуется проверять уровень содержания алкоголя в крови (ВАС) не раньше, чем через полчаса после приёма алкоголя;
3. Если уровень алкоголя в крови, который показал алкотестер высокий, то для производства следующего теста нужно подождать 5-10 минут, чтобы сенсор очистился от паров спирта.
4. Когда мощности батареек не будет хватать, красный и жёлтый индикаторы будут мигать в течение тестирования. Пожалуйста, замените батарейки на новые;
5. Не используйте фонарик во время теста на содержание алкоголя в крови.

Фонарик

Установите переключатель 11 (рис.1) в положение ON, чтобы включить фонарик. Не используйте функцию алкогольного тестирования, когда прибор находится в данном режиме!

Секундомер

1. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить секундомер, когда на дисплее установлено 0:00;
2. Нажмите кнопку START/STOP снова, чтобы остановить отсчёт;
3. Быстро нажимайте кнопку START/STOP, чтобы запускать и останавливать секундомер;
4. Чтобы сбросить счётчик на нули, одновременно нажмите кнопки HR и MIN.

Таймер обратного отсчёта

1. Нажимайте кнопки HR и MIN для установки времени (часы и минуты) для таймера обратного отсчёта;
2. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы включить таймер;
3. Нажмите кнопку START/STOP снова, чтобы остановить отсчёт;
4. Быстро нажимайте кнопку START/STOP, чтобы запускать и останавливать таймер;
5. Двухсекундный предупреждающий сигнал будет звучать в последние пять и десять минут отсчета;
6. Сигнал таймера обратного отсчёта звучит всего 60 секунд. Одновременно нажмите кнопки HR и MIN, чтобы выключить сигнал раньше;
7. Чтобы сбросить счётчик таймера на нули, одновременно нажмите кнопки HR и MIN.

Внимание! Полученные алкотестером результаты не могут служить доказательством для сотрудников ГИБДД, а являются лишь средством оценки собственного состояния.